

機械器具 35 医療用はさみ
動物専用医療機器 一般的名称 医療用はさみ
動物医療用はさみ

【警告】

1. 本品は未滅菌のため使用する際は必ず指定した滅菌を行うこと。（【使用上の注意】の項参照）
2. 曲げる、削る等の加工を行わないこと。
3. 本品の洗浄を行う場合は、手袋等の感染防止のための保護器具を着用のこと。

【形状、構造及び寸法】

1. 概要

本品は手術時に組織、縫合糸等の切断に用いる医療用はさみである。製品番号A13-110、A13-112、A13-114、A13-116、A13-130、A13-132、A13-134、A13-136、A13-182、A13-184、A13-310、A13-312、A13-747、A13-3525は刃先が彎曲形状となっている。

2. 外観写真（代表例）

A13-100



A13-120



A13-140



A13-182



A13-308



A13-743



A13-3524



A80-058



A80-060



3.寸法

品番	全長 mm	刃先の長さ mm	彎曲部 mm	質量 g
A13-100	115.0	47.0	—	20.0
A13-102	130.0	50.0	—	30.0
A13-104	140.0	57.0	—	40.0
A13-106	160.0	67.0	—	50.0
A13-110	115.0	45.0	7.0	20.0
A13-112	130.0	48.0	8.0	30.0
A13-114	140.0	55.0	8.0	40.0
A13-116	160.0	65.0	10.0	50.0
A13-120	115.0	47.0	—	20.0
A13-122	130.0	50.0	—	30.0
A13-124	140.0	57.0	—	40.0
A13-126	160.0	67.0	—	50.0
A13-130	115.0	45.0	7.0	20.0
A13-132	130.0	48.0	8.0	30.0
A13-134	140.0	55.0	8.0	40.0
A13-136	160.0	65.0	10.0	50.0
A13-142	130.0	50.0	—	30.0
A13-144	140.0	57.0	—	40.0
A13-181	90.0	30.0	—	10.0
A13-182	90.0	28.0	6.0	10.0
A13-183	105.0	32.0	—	12.0
A13-184	105.0	30.0	6.0	12.0
A13-308	85.0	10.0	—	10.0
A13-310	80.0	10.0	4.0	10.0
A13-312	80.0	8.0	8.0	10.0
A13-743	140.0	22.0	5.0	105.0
A13-747	140.0	22.0	—	105.0
A13-3524	115.0	25.0	—	16.0
A13-3525	115.0	24.0	6.0	16.0
A80-058	120.0	17.0	—	70.0
A80-060	105.0	6.0	—	40.0

【性能又は効果】

本品は手術時に組織、縫合糸の切断に用いる。

【使用方法】

1. 持ち手に指を掛け刃先を広げて切断する組織、縫合糸等を挟む。
2. 持ち手を閉じることにより組織、縫合糸等を切断する。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸し組織片等の異物をブラシ等を用いて除去する。その後中性洗剤で洗浄する。
4. 中性洗剤を洗い流し、直ちに乾燥させ、ほこり等のかからない場所に保管する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的な注意
 - ・ 本品は未滅菌であるため、使用前に以下の条件で滅菌を行うこと。
高圧蒸気滅菌
温度：121℃
時間：10-15分
 - ・ 本品に傷や変形がないことを使用前に必ず確認すること。
 - ・ 本品は組織や縫合糸等の切断用であり、金属製材料の切断には使用しないこと。刃先の損傷、変形の原因になる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・ 換気設備の整った部屋に設置してください。

【製造販売業者及び製造業の氏名又は名称等】

製造販売業者名：パイオリサーチセンター株式会社
 住所：〒461-0001
 愛知県名古屋市中区泉二丁目28番24号
 電話：052-932-6421
 製造業者名：Doyen Hercules Surgical Co.
 ドーエン ヘラクレス サージカル